


GEBRAUCHSANWEISUNG SPENDER-HORNHAUTSTANZE NACH BARRON

für Hornhauttransplantationen
Gebrauchsfertige Stanze zur einmaligen
Anwendung für die Spenderhornhaut

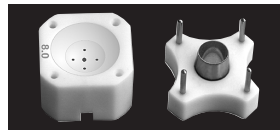

Schneideblock
Basis

Trepanklingen-
Halter

OPERATIONSTECHNIK

Die Spenderhornhautstanze nach Barron darf nur von einem zugelassenen Arzt angewendet werden, der über Erfahrung auf dem Gebiet der Hornhauttransplantation verfügt und mit dem Gebrauch dieses Instrumentes vertraut ist. Die nachfolgenden Anweisungen enthalten nicht alle Verfahrensschritte, die bei einer Hornhauttransplantation durchgeführt werden müssen.

- 1) Klingendurchmesser, der auf der Stanze aufgedruckt ist, überprüfen, und Gummiband von der Stanzeneinheit entfernen.
- 2) Schneideblock mit einer Hand festhalten, Oberseite der Stanze mit der anderen Hand gerade nach oben ziehen und auf das sterile Tablett legen. Weißen Abstandsring entsorgen.
- 3) Zur Markierung der vier Quadranten auf der Epithelseite der Spenderhornhaut, Spitze des sterilen chirurgischen Markierstifts in jedes der vier Löcher in der Vertiefung des Schneideblocks stecken. Stift drehen, bis die Seiten jedes Lochs gleichmäßig mit violetter Farbe überzogen sind.
- 4) Spenderhornhaut mit der Endothelfläche nach oben in den Schneideblock legen. Alles Skleragewebe, das über den Schneideblock ragt, ebenfalls entfernen. Transplantat mit einer feinzahnigen Pinzette im Schneideblock zentrieren.
- 5) Schneideblock auf eine feste flache Oberfläche stellen. Die vier Stäbchen des Trepanklingengehäuses in die entsprechenden Löcher des Schneideblocks einführen. Daumen direkt über die Trepanklinge legen und fest nach unten drücken.
- 6) Trepanklinge durch Hochziehen des Klingengehäuses entfernen. Das Hornhaut-Implantat bleibt in der Regel in der Vertiefung des Blocks, während der periphere korneosklerale Rand auf der Klinge bleibt. Wenn das Implantat in der Klinge bleibt, kann es durch Auftröpfeln einer BSS-Lösung oder einer viskoelastischen Substanz auf die Endothelseite durch die Mitte der Trepanklinge gelöst werden.

WARNHINWEIS:

Vor der klinischen Anwendung muß der Chirurg mit allen Aspekten des Operationsverfahrens und mit diesem Instrument vollkommen vertraut sein.

WICHTIG:

Diese Spenderhornhautstanze wurde mit ETO-Gas sterilisiert. Dieses Einmal-Instrument ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt

und darf nicht resterilisiert oder wiederverwendet werden.

Diese Spenderhornhautstanze wurde sorgfältig geprüft, bevor sie verpackt wurde und ist bei Lieferung gebrauchsfertig.

WARNHINWEIS: NACH AMERIKANISCHEM BUNDESGESETZ DARF DIESE VORRICHTUNG NUR VON EINEM ARZT ODER AUF DESSEN ANWEISUNG VERKAUFT WERDEN.

Beschränkte Produkthaftung

Garantiert, daß dieses Produkt bis zu seinem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Wenn dieses Instrument aufgrund solcher Mängel während der Garantieperiode versagt, wird der Verkäufer in seinem Ermessen das Instrument reparieren oder gegen dasselbe Modell, oder, wenn dasselbe Modell nicht mehr produziert wird, gegen ein Modell ähnlicher Art, Funktion und Leistung austauschen. ALLE ANDEREN GARANTIE GLEICH WELCHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE ÜBER DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG, SIND AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. MIT AUSNAHME DER KOSTEN FÜR DIE REPARATUR ODER DEN AUSTAUSCH UNTER DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE IST DER VERKÄUFER NICHT FÜR VERLUST, FOLGESCHÄDEN, AUSGABEN ODER HAFTUNGEN DES KÄUFERS INFOLGE DER VERWENDUNG, FEHLERHAFTEN VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERANTWORTLICH. Jede Bestimmung dieses Haftungsausschlusses, die in der schriftlich vorliegenden Form nicht vollstreckbar ist, gilt nur soweit notwendig als geändert oder gestrichen, um die Vollstreckbarkeit der restlichen Vorschriften zu bewahren. Der Käufer bestätigt, daß dieses Produkt nur für die Anwendung durch geschulte Personen mit den erforderlichen Fähigkeiten und der notwendigen Erfahrung in der Anwendung dieser Vorrichtung gemäß den vorherrschenden Standards der medizinischen Praxis und gemäß den dieser Vorrichtung beiliegenden Anweisungen bestimmt ist. Durch die Verwendung dieses Produkts erklärt sich der Käufer damit einverstanden, den Verkäufer für und gegen Verluste, Schäden, Ausgaben oder Haftung, die dem Käufer aufgrund eines Fehlers des Käufers oder Anderer unter der Kontrolle des Käufers bei der Anwendung dieses Produkts entstehen, schadlos zu halten und zu entschädigen und daraus zu befreien.